

## Myfullsize – Gebrauchsanweisung

VOR DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS SOLLTEN BENUTZER DIE IN DIESER GEBRAUCHSANWEISUNG ENTHALTENEN ANWEISUNGEN LESEN UND VERSTEHEN.

### **Verwendungszweck**

Myfullsize ist ein nicht-medizinisches Gerät, das zum Dehnen und Verlängern des Penis verwendet werden kann.

Myfullsize ist so konzipiert, dass es unter der Kleidung getragen werden kann und jederzeit (außer beim Schlafen) verwendet werden kann.

Es ist kein medizinisches Produkt und nur für den Freizeitgebrauch bestimmt.

Bitte konsultieren Sie einen Arzt, um eine auf Ihren speziellen Zustand abgestimmte Beratung zu erhalten.

1. Nehmen Sie Myfullsize aus der Stofftasche.



2. Verwenden Sie den verstellbaren Riemen am Knieband, damit es sicher an Ihrem Bein sitzt. Der Riemen kann oberhalb oder unterhalb des Knies angebracht werden.



3. Führen Sie Ihren Penis bis zu 2,5 cm hinter der Eichel in den Schaumstoffring ein. Achten Sie darauf, dass der Schaumstoffring für Sie bequem sitzt.



4. Befestigen Sie Ihren Penis im Schaumstoffring, indem Sie die beiden Silikonbänder verknoten. Der Schaumstoffring muss Kontakt mit dem Penis haben, nicht die Silikonbänder. Achten Sie darauf, dass der Knoten nicht zu fest sitzt.
5. Verwenden Sie die beiden Rollen, um die Spannung einzustellen, und ziehen Sie Ihren Penis an Ihrem Bein entlang nach unten.



6. Ziehen Sie mit einer Hand an den Schnüren, während Sie mit der anderen Hand die Schnurverschlüsse in die entgegengesetzte Richtung ziehen, um die gewünschte Spannung einzustellen.  
Je kürzer die Schnur zwischen dem Schaumstoffring und den Schnurverschlüssen ist, desto höher ist die Spannung.



7. Die Enden der Schnüre können hinter dem Kniegurt verstaut werden.

**WICHTIG: VERSUCHEN SIE NICHT, MEHR SPANNUNG AUF IHREN PENIS AUSZÜBEN, ALS ANGENEHM IST.**

8. Tragezeit

Anfänger	10-20 Minuten pro Dehnungssitzung in den ersten zwei Wochen. Es können 3 Sitzungen an 5-7 Tagen pro Woche durchgeführt werden. Machen Sie zwischen jeder Sitzung mindestens 30 Minuten Pause und versuchen Sie, diese über den Tag zu verteilen. Verlängern Sie die Dauer der Dehnung im Laufe der Wochen allmählich, wenn sich Ihr Penis an die Spannung und Dehnung gewöhnt hat.
Fortgeschritten	1–2 Stunden pro Dehnungssitzung, 5–7 Tage pro Woche. Wir empfehlen Ihnen, zwischen den Sitzungen mindestens 30 Minuten Pause zu machen.

### **Warnhinweise**

Der Schaumstoffring sollte eng anliegen und keine Schmerzen an Ihrem Penis verursachen. Leichte Hautverfärbungen sind normal und verschwinden innerhalb weniger Minuten nach der Anwendung.

Entfernen Sie das Gerät sofort, wenn die Haut Ihres Penis dunkelviolett/schwarz wird oder wenn Sie Schmerzen, Kälte oder Kribbeln verspüren.

Wenn Sie bei der Verwendung von Myfullsize Beschwerden verspüren, stellen Sie die Verwendung sofort ein.

Verwenden Sie das Produkt nicht während des Schlafs.

Verwenden Sie das Produkt nicht länger als 2 Stunden am Stück.

### **Pflege Ihres Produkts**

Es wird empfohlen, das Myfullsize-Produkt vor und nach dem Gebrauch mit einem feuchten Tuch, Seife (oder einem anderen milden Reinigungsmittel) und Wasser zu reinigen.

Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel wie Bleichmittel, da diese das Material mit der Zeit angreifen können.

Lassen Sie das Produkt nach der Reinigung an der Luft trocknen. Verpacken und bewahren Sie das Myfullsize-Produkt in dem mitgelieferten Staubbeutel auf.

### **Materialzusammensetzung**

Myfullsize besteht aus körperverträglichen Materialien, darunter Silikon.

Dieses Produkt enthält kein Latex und keine Phthalate.