

Myfullsize – Bruksanvisning

FØR BRUK AV DETTE PRODUKTET, BØR BRUKERE LESE OG FORSTÅ INSTRUKSJONENE SOM ER ANGITT I DENNE BRUKSANVISNINGEN

Tilsiktet bruk

Myfullsize er et ikke-medisinsk produkt som kan brukes til å strekke og forlenge penis.

Myfullsize er designet for å brukes under klær og kan brukes når som helst (unntatt når du sover).

Det er ikke-medisinsk og kun beregnet for rekreasjonsbruk.

Rådfør deg med helsepersonell for veiledning basert på din spesifikke tilstand.

1. Pakk ut Myfullsize fra stoffposen.



2. Bruk den justerbare stroppen på knebåndet slik at den sitter godt på beinet ditt. Stroppen kan plasseres over eller under kneet.



3. Sett penis inn i skumringen opptil 2,5 cm bak penishodet. Sørg for at skumringen er i en behagelig posisjon for deg.



4. Fest penis i skumringen ved å knyte en knute med de to silikontauene. Skumringen må være i kontakt med penis, ikke silikontauene. Sørg for at knuten ikke er for stram
5. Bruk de to trinsene til å justere spenningen og trekk penis nedover benet.



6. Trekk i tauene med den ene hånden mens du trekker i tauene i motsatt retning med den andre hånden for å låse ønsket spenning.
Jo kortere snorlengden mellom skumringen og hjullåsene er, jo høyere blir spenningen.



7. Endene på tauene kan stikkes bort bak knebåndet.

VIKTIG: FORSØK IKKE Å LEGGE MER SPENNING PÅ PENISEN DIN ENN DET ER BEKVEMT.

8. Brukstid

Nybegynner	10-20 minutter for hver strekkøkt de første to ukene. Du kan gjennomføre 3 økter 5-7 dager i uken. Ta minst 30 minutters pause mellom hver økt, og prøv å fordele dem utover dagen. Øk gradvis varigheten av strekkingen over ukene etter hvert som penis blir vant til spenning og strekking.
Ekspert	1-2 timer per strekkøkt, 5-7 dager per uke. Vi anbefaler at du tar minst 30 minutters pause mellom øktene.

Advarsler

Skumringen skal sitte tett og ikke forårsake smerter i penis. Lett misfarging av huden er normalt og vil forsvinne i løpet av få minutter etter bruk.

Fjern umiddelbart hvis huden på penis blir mørk lilla/svart eller hvis du føler smerte, kulde eller prikking.

Hvis du føler ubehag ved bruk av Myfullsize, må du umiddelbart slutte å bruke produktet.

Ikke bruk mens du sover.

Ikke bruk i mer enn 2 timer per gang.

Vedlikehold av produktet

Det anbefales at du rengjør Myfullsize-produktet før og etter bruk med en fuktig klut med såpe (eller annet mildt vaskemiddel) og vann.

Ikke bruk sterke vaskemidler som blekemiddel, da dette kan føre til at materialene brytes ned over tid.

La produktet lufttørke etter rengjøring. Pakk og oppbevar Myfullsize-produktet i den medfølgende støvposen.

Materiale

Myfullsize er laget av kroppssikre materialer, inkludert silikon.

Dette produktet inneholder ikke lateks eller ftalater.